

# 10%氢氧化钾说明书

## 产品简介：

10%氢氧化钾可以溶解上皮细胞、红细胞、白细胞等，但不能溶解真菌、孢子菌和菌丝（含假菌丝）。

## 产品组成：

产品名称	规格	storage
10%氢氧化钾	100ml	RT
使用说明书	1 份	

## 操作步骤(仅供参考)：

- 1、取清洁玻片一张，滴加生理盐水 3—4 滴。
- 2、将阴道拭子在生理盐水中涂抹适度。
- 3、发现可以真菌孢子或菌丝（含假菌丝）时滴加 10%氢氧化钾 3-4 滴，混匀，在显微镜下观察。

## 结果判定：

形状符合且不被 10%氢氧化钾溶解者即为真菌。

**储存：**2-25℃，相对湿度 40-75%，避光。

**有效期：**12 个月有效。